

PAWS

Montering och justering av
manuell PAWS



INSTÄLLNING AV PAWS



1. Ta loss en av griparmarna och justera gapet så att man kan fästa dem stadigt med låshandtaget. Greppen går att justera för rör mellan 19-32 mm och det görs genom att man skruvar in eller ut muttern på insidan av klämman med en 13 mm hylsa.
2. Gör om proceduren med den andra armen.




3. Montera ena klämarmen i breddjusteringsstycket




4. Lossa alla tre justeringsskruvarna för höjd, rotation in-/ut samt vinkel med en 6 mm och 8 mm insexnyckel så att hela fastsättningsdelen är helt lös och flexibel.



5. Kör in rullstolen i gapet och hitta ett läge för att kunna låsa fast greppet runt benstödet (rörskyddet). När man kan låsa fast greppet innebär det att alla justeringsmått ligger rätt.
6. Med greppet fortfarande låst drar ni åt alla tre skruvarna för att låsa positionen. Sida ett är nu klar.
7. Koppla loss rullstolen och gör om proceduren på andra sidan.

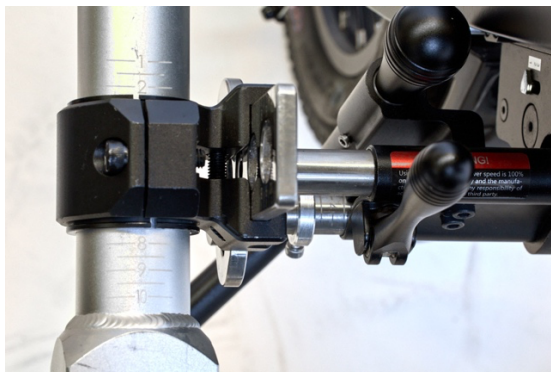

8. Justera in bredden så att klämmorna har samma avstånd från centrumdelen på PAWS och lås med snabblåsen. Lås fast PAWS vid rullstolen, lossa skruven för låsringen på varje sida med en 4 mm insexnyckel.

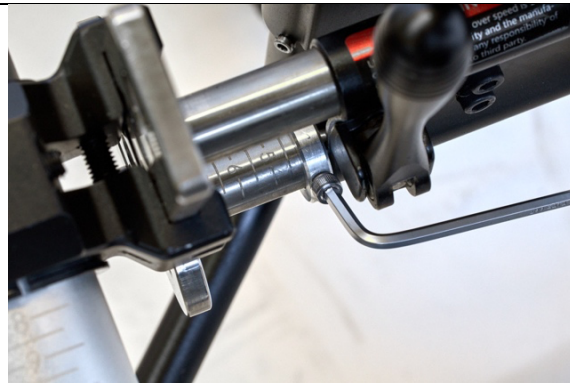

9. För in låsringarna mot centrumdelen på PAWS och lås fast dem. Detta innebär att hela fastsättningsenheten kommer att hamna i rätt läge när man t ex har tagit loss dem för att frakta PAWS i bilen.

REHASENSE SVERIGE
POLHEMSGATAN 28
SE-392 39 KALMAR, SWEDEN



+46 722 325 090



MATS.WIHLBACKA@REHASENSE.COM